

使用上の注意（再滅菌、分解、組立不可）

- ・本製品はディスポーザブルのため繰り返し使用できません。
- ・本製品は内視鏡を保持する目的には使用できません。
- ・本製品はf-URS処置具の保持をするもので、それ以外には使用できません。
- ・突起部で手袋を傷つけたり、強い力を加えると壊れたり、破損部でけがをする恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。


D-Bind™

Ureteral Access sheath holder

ORDERING INFORMATION

製品名：D-B i n d™

カタログ番号：DB0001
入り数：5本/中箱（大箱は50本、5本入り中箱が10箱）
規格：1本/袋（EOG滅菌）
有効期限：滅菌日から3年
全長：30cm（セットアップ前）
アクセスシース側：小クリップ（最大開口7mm）
手術用ドレープ側：大クリップ（最大開口3cm）

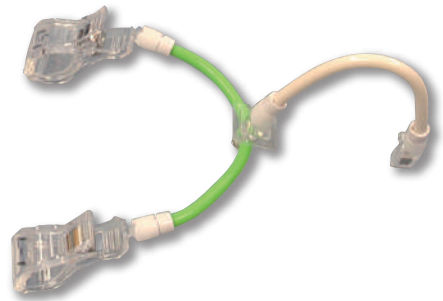

関連製品

Proxis


URETERAL ACCESS SHEATH

ORDERING INFORMATION

バード PROXIS 尿管アクセスシース

カタログ番号	ダイレータ径	シース径	シース長	包装単位	償還区分
231025	10Fr	12Fr	25cm	1入	尿路拡張カテ・尿管
231035			35cm		
231045			45cm		
231225	12Fr	14Fr	25cm		
231235			35cm		
231245			45cm		

販 売 名：バード PROXIS 尿管アクセスシース
認 証 番 号：229ADBZX00080000
クラス分類：[2]管理医療機器
一般的名称：カテーテル拡張器（コード：32338000）

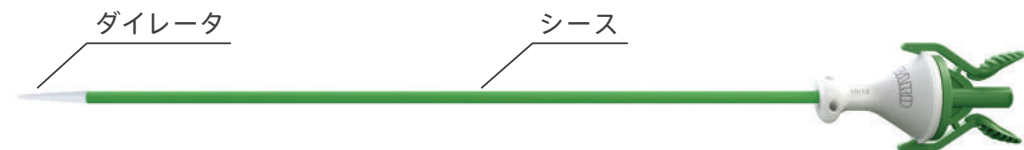

ウェブサイトでは製品詳細、使用方法を動画でご覧いただけます。

・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

販売元

株式会社メディコン

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎0120-036-541

crbard.jp



BD, the BD Logo and all other trademarks are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. © 2020 BD. All rights reserved.

2020.9.5,000 BD-20388

D-Bind™

ユーザーガイド


販売元：株式会社メディコン

製品使用目的・製品特徴&装着方法

D-Bind™は f-URSで使用される尿管アクセスシースの保持および手術用ドレープの固定に使用されるホルダーです。

D-Bind™は


術野で患者を覆う手術用ドレープに固定する2つのD-Bind™クリップ(大)とワイドアーム、また尿管アクセスシースを保持するシースクリップ(小)とクレーンアームで構成されており、2つのアームの柔軟な変形動作を中央のクリアアジャスタが支える構造となっています。

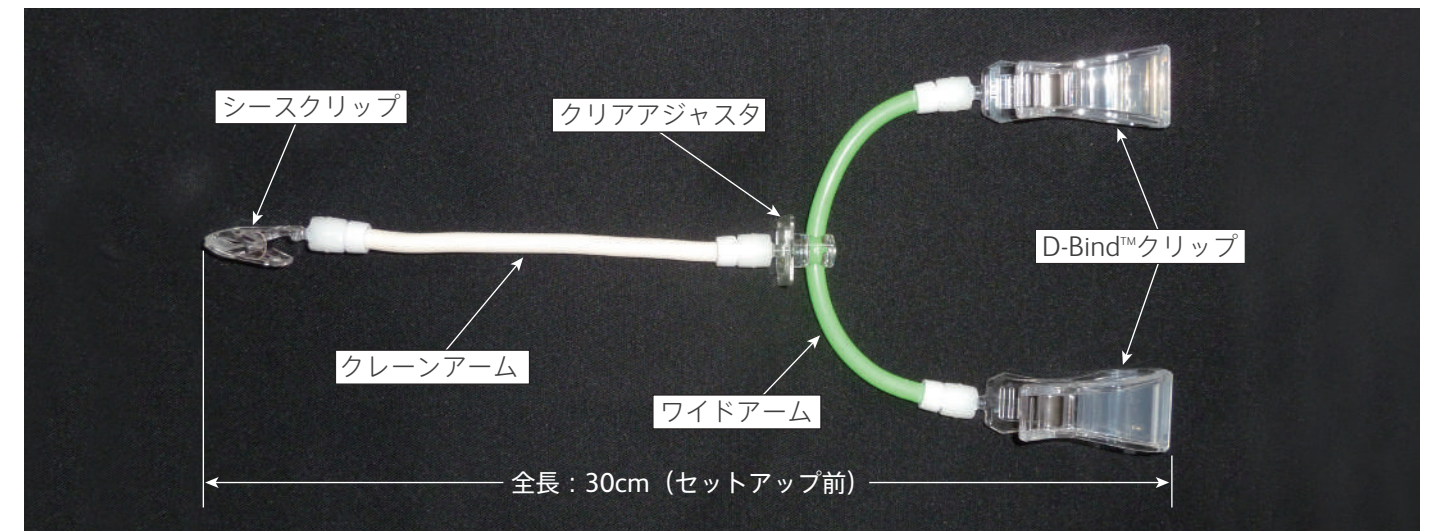

次にD-Bind™の装着方法を透明シミュレータを用いて説明します。


※実際に使用される際は滅菌手袋を着用しご使用ください。

1 取り出し

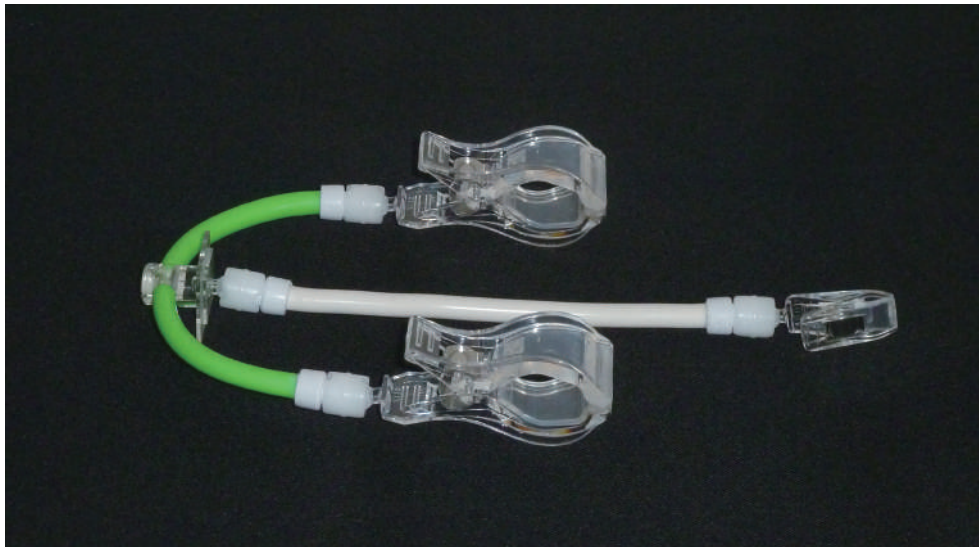

D-Bind™はコンパクトにたたまれた状態で滅菌包装されているので、注意深く取り出します。

2 セットアップ

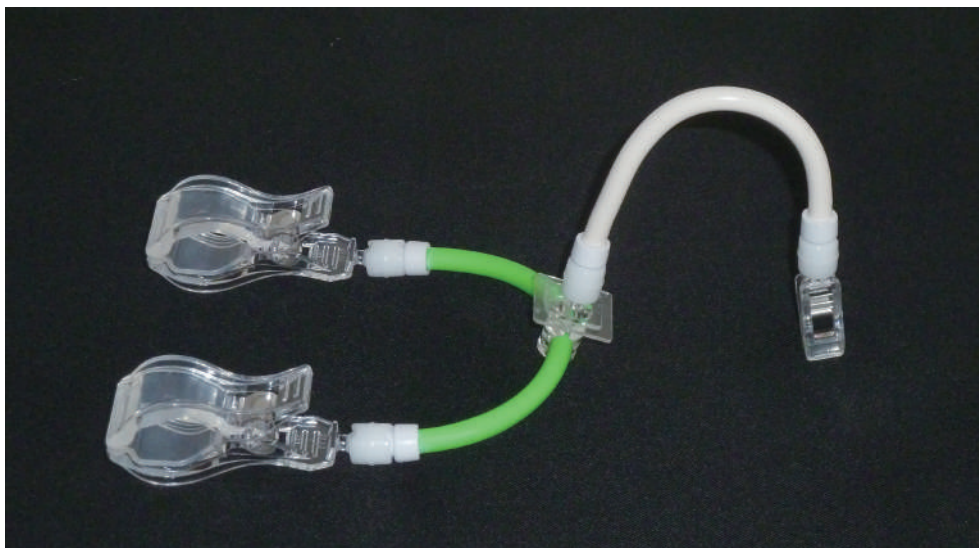

実際のf-URSにおける各クリップのホールド位置をあらかじめ想定し、D-Bind™が持つワイドとクレーンの2つのアームを変形、調整しセットアップしておきます。

3 手術用ドレープへの固定




尿管アクセスシース挿入後、ワイドアームを調節し、D-Bind™クリップをシースの位置とクレーンアームとの距離を確認して体表面にフラットになるように手術用ドレープに固定します。

4 尿管アクセスシースの固定



挿入された尿管アクセスシースの固定可能な部位にクレーンアームのカーブ形状を調整しながらシースクリップでシースを固定します。

5 尿管アクセスシースの保持確認とf-URS開始

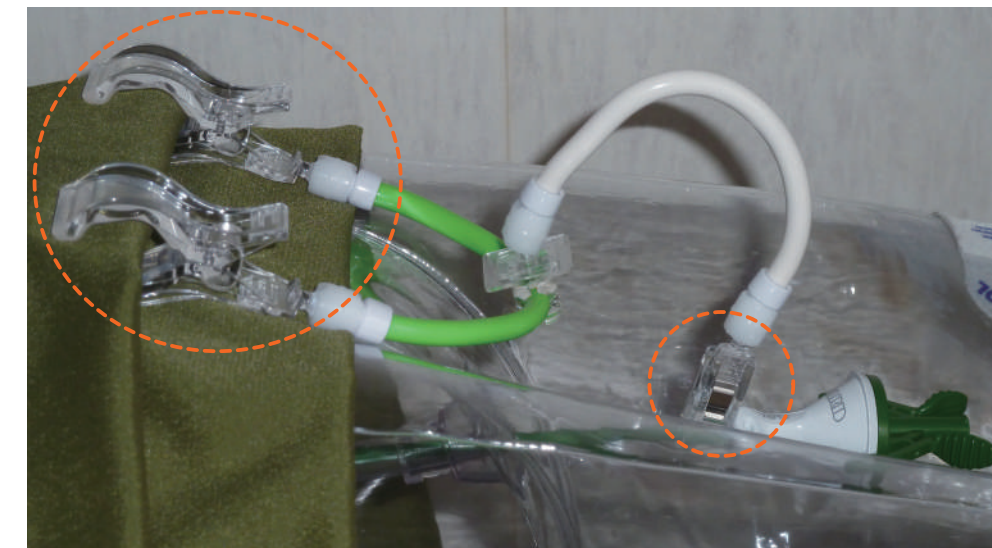

D-Bind™が手術用ドレープに固定され尿管アクセスシースが適切に保持できていることを確認し、f-URSを開始します。

6 f-URSの終了とD-Bind™の取り外し



f-URSが終了したら、D-Bind™をシースクリップ⇒D-Bind™クリップの順に適切に取り外します。