



陰部清拭用ワイプ ピュレル® シュアステップ™ ペリケア

PURELL® SURESTEP™ PERICARE



1 care = 5 steps

カテーテル留置中の尿道口周囲のケアを、誰もが統一した手技で簡便に実施できます。

消毒剤不使用

アルコールなど消毒剤としての成分は含まれていません。洗浄としての役割をしっかりと果たします。

9種類の保湿剤

9種類の保湿剤により、お肌に優しいケアを提供します。

感染対策

患者様一人に対し1パッケージ使いきりですので、交差感染のリスクを防ぎます。また、洗浄時のお湯の飛び散りや、使用後の器具の洗浄業務も軽減できます。

【成分】 水、PG、セテアレスー25、ポリソルベート80、安息香酸Na、エチルヘキシルグリセリン、プロパンジオール、クエン酸、アルガニアスピノサ核油、乳酸、グルタミン酸ジ酢酸4Na、アロエバラ葉エキス、ラムノース、グルコース、グルクロン酸




手順

- ① 手指衛生を実施し、手袋を着用します。
- ② 臀部の下に防水シートを敷きます。
- ③ 5枚全てを本製品パッケージから取り出し、防水シート等の上に置きます。パッケージは上面の使用方法が見えるように置きます。
- ④ パッケージに記載の使用方法の手順に従ってケアを実施します。ステップ毎に1枚ワイブシートを使用します。
- ⑤ ケアが終了したらオレンジ色のコンプライアンスステッカーを採尿バッグや専用のカードに貼付します。




ウェブサイトで
手順の動画を
配信しています。

女性

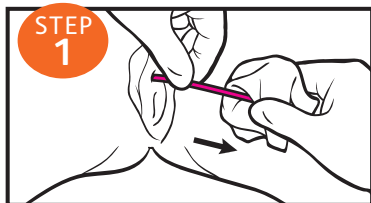


膀胱留置カテーテル

最初に、カテーテル挿入部から開始して2.5～5cmくらいを遠位に向かって清拭します。その後、利き手ではない方の手でカテーテルを持ち、カテーテルの分岐点部分まで清拭します。

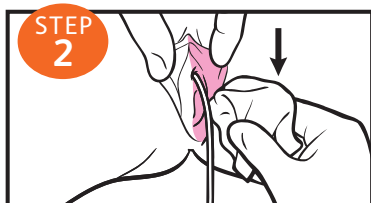


小陰唇(右)

外尿道口部から片側の陰唇部を下に向かって拭きます。

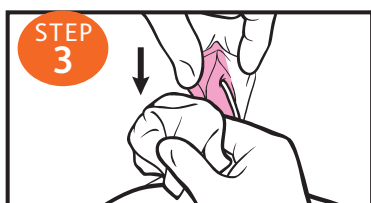

小陰唇(左)


外尿道口部から反対側の陰唇部を下に向かって拭きます。

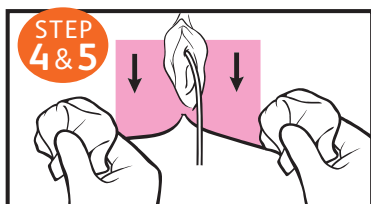

会陰部周辺


会陰部周辺をそれぞれ別のワイブを用いて拭きます。

男性

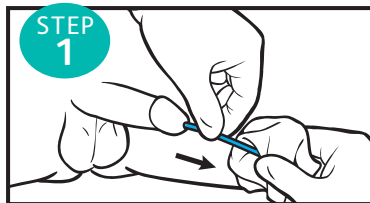


膀胱留置カテーテル

最初に、カテーテル挿入部から開始して2.5～5cmくらいを遠位に向かって清拭します。その後、利き手ではない方の手でカテーテルを持ち、カテーテルの分岐点部分まで清拭します。

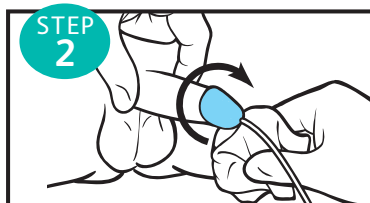


龟头部

外尿道口部から龟头部を清拭します。

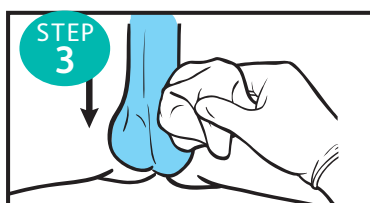

陰茎～陰嚢部

陰茎と陰嚢を清拭します。

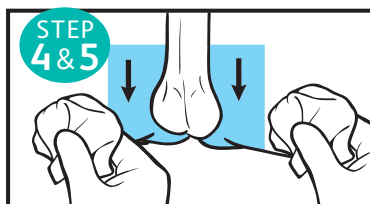

会陰部周辺

会陰部周辺をそれぞれ別のワイブを用いて清拭します。

※本品を使用する際には、同じワイブシート面が一度清拭した部分に再度触れないよう気をつけてください。(交差汚染を防ぐため)

※使用したワイブシートは、使用後すぐに廃棄してください。トイレには、流さないでください。

※1回のケアでワイブシートを5枚全て使い切ってください。



日常の陰部ケアは、ガイドライン(や勧告)などではカテーテル留置中のケアの一環として推奨されています。

- カテーテル留置中にCAUTI予防のために消毒薬で尿道口周囲を消毒しない。日常的な衛生管理(例: 毎日の入浴やシャワー時の尿道面の洗浄など)が適正である。(CDC)¹⁾
- 尿道口を消毒剤で洗浄することは必要ない。定期的な清潔法(hygiene)が適当である。(SHEA)²⁾
- 少なくとも、施設のプロトコル・手順に従い1日に1回及び必要に応じて、陰部のケアを実施する。(ANA)³⁾

【参考文献】 1) Gould CV, et al. HICPAC Guideline for Prevention of Catheter-Associated Urinary Tract Infections, Center for Disease Control, 2009.

2) Lo E, et al. Strategies to Prevent Catheter-Associated Urinary Tract Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update. *Infection Control and Hospital Epidemiology*. 2014; 35(5): 464-79.

3) Streamlined Evidence-Based RN Tool: Catheter Associated Urinary Tract Infection (CAUTI) Prevention, American Nurses Association. 2015.

販売名: シュアステップ ワイブ

カタログ番号	1パッケージ	商品サイズ	包装単位	外箱サイズ	製品仕様	製造国
DFC100	5枚入	200mm×200mm	120袋入(バラ) /1箱	402mm×332mm×206mm	未滅菌	フランス
DFC010			10袋入/1箱	193mm×105mm×98mm		
			10袋入/1箱×12箱入	404mm×337mm×211mm (±6.4mm)		

・事前に必ず使用方法を読み、本製品の使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。

・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売元

ゴージャージャパン株式会社
東京都千代田区内神田1-6-6

crbard.jp

販売元

株式会社メディコン

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8
☎0120-036-541



PURELL, PURELL Logo, ピュレル are property of GOJO Industries, Inc.
BD, the BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. © 2019 BD. All rights reserved.

2019.10.10,000 UCC_M4031