



陰部清拭用ワイプ ピュレル® シュアステップ™ ペリケアの使用手順は、
ウェブサイトで動画を配信しています。
本使用手順とあわせて、ぜひご参照下さい。

陰部清拭用ワイプ ピュレル® シュアステップ™ ペリケア

PURELL® SURESTEP™ PERICARE

日常の陰部ケアは、ガイドライン(や勧告)などではカテーテル留置中のケアの一環として推奨されています。

- カテーテル留置中にCAUTI予防のために消毒薬で尿道口周囲を消毒しない。日常的な衛生管理(例:毎日の入浴やシャワー時の尿道面の洗浄など)が適正である。(CDC)¹⁾
- 尿道口を消毒剤で洗浄することは必要ない。定期的な清潔法(hygiene)が適当である。(SHEA)²⁾
- 少なくとも、施設のプロトコル・手順に従い1日に1回及び必要に応じて、陰部のケアを実施する。(ANA)³⁾

【参考文献】 1) Gould CV, et al. HICPAC Guideline for Prevention of Catheter-Associated Urinary Tract Infections, Center for Disease Control, 2009.
2) Lo E, et al. Strategies to Prevent Catheter-Associated Urinary Tract Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update. *Infection Control and Hospital Epidemiology*. 2014; 35(5): 464-79.
3) Streamlined Evidence-Based RN Tool: Catheter Associated Urinary Tract Infection (CAUTI) Prevention, American Nurses Association. 2015.

ORDERING INFORMATION

販売名: シュアステップ ワイプ

カタログ番号	1パッケージ	商品サイズ	包装単位	外箱サイズ	製品仕様	製造国
DFC100	5枚入	200mm×200mm	120袋入(バラ) /1箱	402mm×332mm×206mm	未滅菌	フランス
DFC010			10袋入/1箱	193mm×105mm×98mm		
			10袋入/1箱×12箱入	404mm×337mm×211mm (±6.4mm)		

製造販売元
ゴージャージャパン株式会社
東京都千代田区内神田1-6-6

販売元
株式会社メディコン
本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8
☎0120-036-541

crbard.jp

PURELL, PURELL Logo, ピュレル are property of GOJO Industries, Inc.
BD, the BD Logo and SureStep are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.
All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 BD. All rights reserved.

2020.2.5,000 UCC_M1513




使用手順

陰部清拭用のワイプシートです。
(石鹼成分と保湿成分入り※)

膀胱留置カテーテル**挿入前**、**留置中**の
陰部清拭にご使用ください。

**1患者さん1回のケアで1袋(5枚)を
使い切ってください。**
(複数の患者さんに使い回しはしないでください)

※【成分】水、PG、セテアレスー25、ポリソルベート80、安息香酸Na、エチルヘキシルグリセリン、
プロパンジオール、クエン酸、アルガニアスピノサ核油、乳酸、グルタミン酸ジ酢酸4Na、
アロエベラ葉エキス、ラムノース、グルコース、グルクロン酸

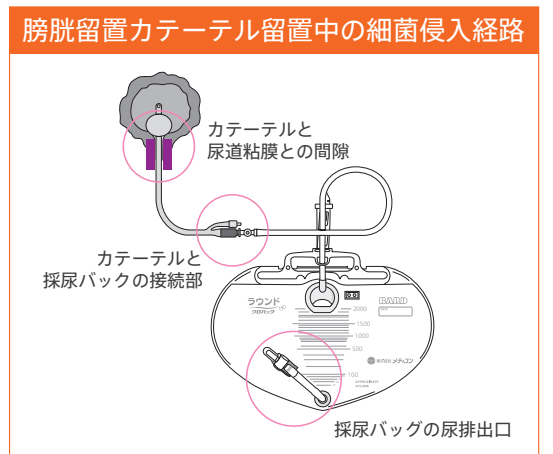

陰部清拭用ワイプシート ペリケアの使用手順


準備



石けんと流水による手洗い、もしくは擦式消毒アルコール製剤による手指衛生を行います。




本品を準備し、清潔な非滅菌手袋を着用します。

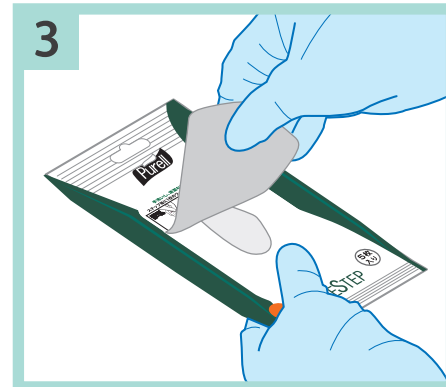

パッケージ上面のシールを剥がし、ワイプシート5枚全てをパッケージから取り出します。




5枚のワイプシートを防水シート等の上に置きます。パッケージは上面の使用方法が見えるようにおきます。

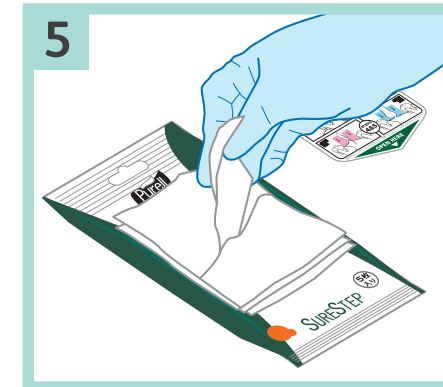


下記使用方法の手順に従って、ステップ毎に1枚のワイプシートを使用します。

最後に

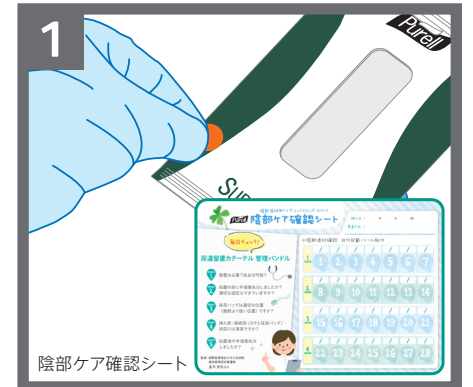


病院のプロトコルに従い、陰部清拭をしたタイミングでオレンジ色のシールを排液バッグや患者記録等に貼付します。


男性

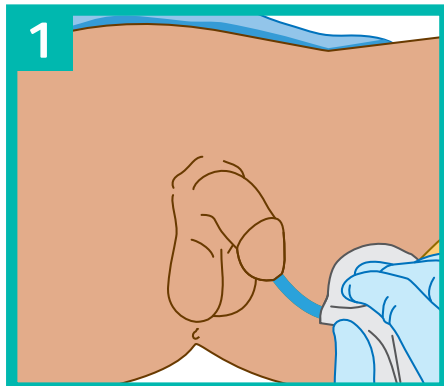


1枚目のワイプでカテーテル挿入部から2.5~5cmを優しく拭きます。

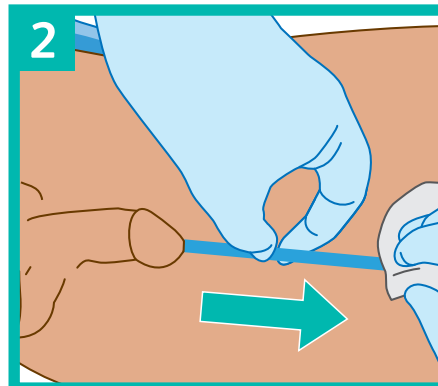


汚染されていない反対側の手でカテーテルの挿入部近くを持ち、カテーテルの分岐点部分まで拭きます。

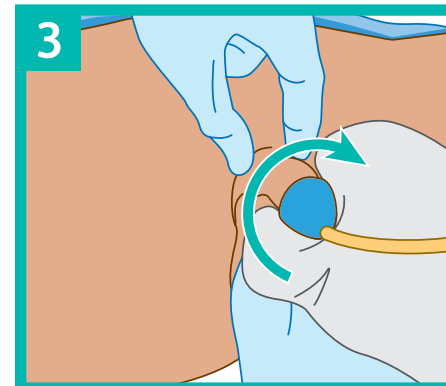

2枚目のワイプで亀頭部の清拭をします。陰茎の根元部分を片手で持ち、利き手で持ったワイプを図のように回転させながら拭きます。

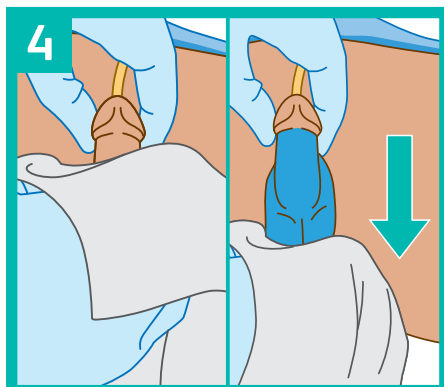


3枚目のワイプを用いて陰茎と陰嚢を上から下へ拭きます。

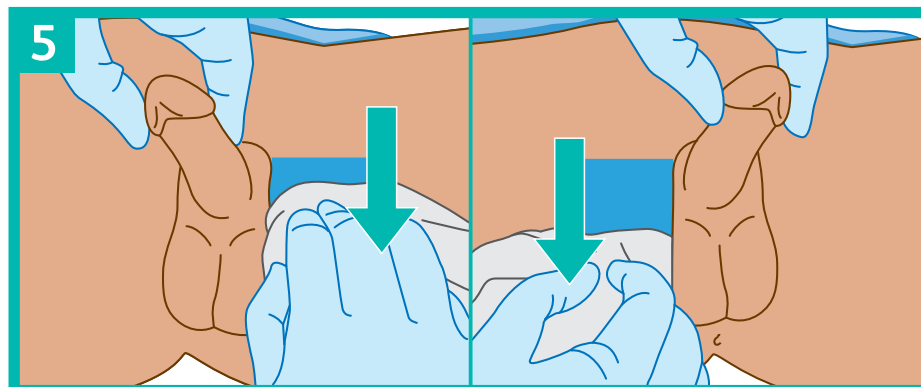


4枚目と5枚目のワイプを用いて片側の外陰部周囲を上から下に拭きます。


女性

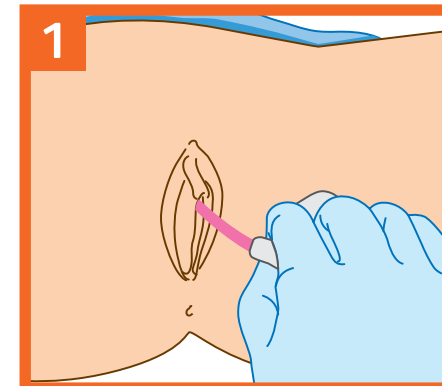


1枚目のワイプでカテーテル挿入部から2.5~5cmを優しく拭きます。

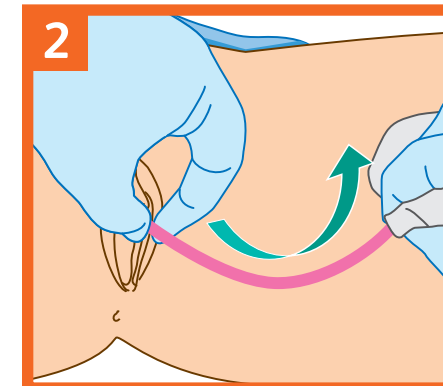


汚染されていない反対側の手でカテーテルの挿入部近くを持ち、カテーテルの分岐点部分まで拭きます。

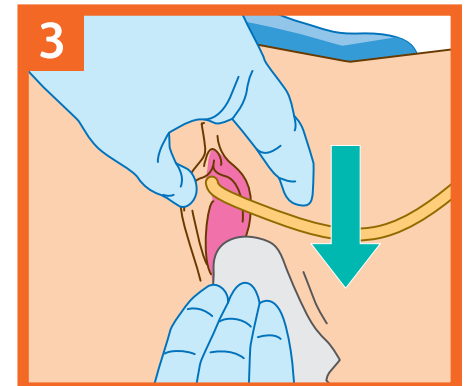

2枚目のワイプを用いて片側の陰唇を上から下に拭きます。

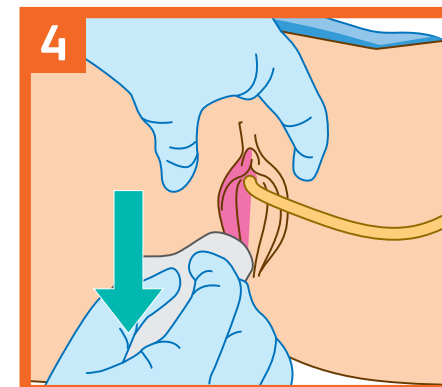

3枚目のワイプを用いて反対側の陰唇を上から下に拭きます。

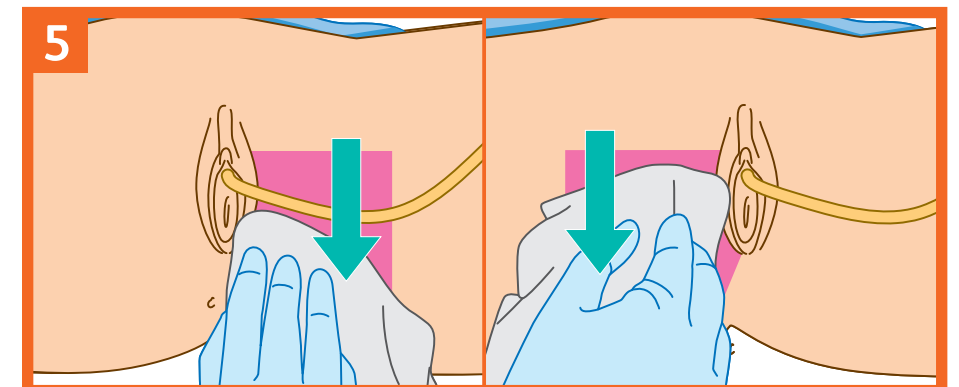

4枚目と5枚目のワイプを用いて片側の外陰部周囲を上から下に拭きます。