



Spirit™

HYDROCOLLOID ADHESIVE SHEATH

# スピリット 使用手順書


# Spirit™

HYDROCOLLOID ADHESIVE SHEATH

## スピリット使用手順

### 1. サイズの測定

添付のサイジングガイドを使用して適切なサイズを選択します。サイズガイドを陰茎にあて、対応するサイズを確認します。快適さと効果のために、陰茎の太さに最も近いサイズを選択してください。

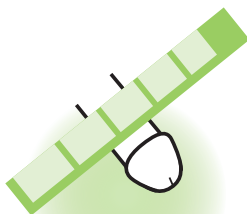

### 2. 物品の準備

- ・カテーテル
- ・接続チューブ付きの採尿バッグ
- ・先端の尖っていないはさみ
- ・石鹸（肌にクリームや油脂分等の残留物を残さないもの）
- ・手ぬぐい、タオル



### 3. 陰毛の手入れ

始める前に必ず手を洗ってください。カテーテルの粘着剤を妨げる可能性のある場合、陰毛を切り取ります。



### 4. 陰茎を洗う

カテーテルの粘着剤が適切に機能するためには、皮膚が清潔で完全に乾燥している必要があります。陰茎を低刺激な石鹸（人工香料を含まない）と温水で洗います。カテーテルを装着する前に完全に乾燥していることを確認してください。



### 5. 装着

丸まったままのカテーテルを陰茎先端の上に置きます。ゆっくりと慎重にカテーテルを広げ、先端の漏斗状の端に十分なスペースを残し、陰茎の先端が漏斗状部の内側に擦れないようにします。包皮をめくることができない場合は、包皮をめくらずに装着してください。

### 6. 軽く握り密着させる

カテーテルのしわを滑らかにします。やさしくカテーテルを握り、皮膚に適切に密着させます。粘着剤が適切に密着されていないと、装着時間が著しく短縮される場合があります。

注意：カテーテルのしわが取れない場合、不適切なサイズが選択された可能性があります。より小さいサイズを選択してください。

### 7. 採尿バッグを接続する

活動性や衣服に応じて、適切な採尿バッグを選択します。チューブの先端をカテーテルに接続します。脚に装着するタイプの採尿バッグを使用する場合、尿が溜まりカテーテルが引っ張られる前に、必ず空にしてください。



### 重要：装着時間

適切な衛生のために、男性用外付けカテーテルは24時間ごとに交換することをお勧めします。



### 採尿バッグとの接続を外す

採尿バッグが空であることを確認し、接続チューブをカテーテルから取り外します。脚に装着する採尿バッグを取り外す場合には、接続チューブを閉じてクランプし、レッグストラップを脚から取り外した後で、接続チューブを外します。



### カテーテルの取り外し

カテーテルをゆっくりと巻き下ろし、陰茎から外します。必要に応じて、温かい湯に浸した布（湿らせた洗面用タオル等）でカテーテルの周りを包み、粘着剤が取れやすくなるように温めます。



サイズガイドで陰茎の太さを確認します。適切なサイズ選択については、医療専門家にもご相談下さい。

サイズ  
ガイド

25 mm  
Small

29 mm  
Medium

32 mm  
Intermediate

36 mm  
Large

41 mm  
X-Large

## 好みで選べる3つのスタイル



### Style 1

- ・ 中間に粘着剤部のあるスタンダードタイプ
- ・ 装着部長さ3インチ (約76mm)
- 粘着剤部1.75インチ (約44mm)



### Style 2

- ・ 3タイプの中で最も短い筒状部ながら、カテーテルの外れを低減する広い粘着剤面
- ・ 装着部長さ1.5インチ (約38mm)
- 粘着剤部1.75インチ (約44mm)



### Style 3

- ・ 3タイプの中で最も広い粘着剤面で意図しない外れを最小限に
- ・ 装着部長さ3インチ (約76mm)
- 粘着剤部3インチ (約76mm)

適応：本品は尿失禁対策用の粘着剤付男性用外付けカテーテルです。

禁忌：炎症や傷がある皮膚には使用しないでください。

警告：再利用および再梱包は、製品の特性を損なう、または破損につながるおそれがあり、合併症のリスクが高まる可能性があるため避けてください。

使用上の注意：以下のことに注意して使用してください。

- ・ アレルギー反応が生じた場合は使用しないこと。
- ・ 衛生管理のため、カテーテルは毎日取り替えること。
- ・ 同じカテーテルを24時間以上使用することで、合併症のリスクが高まる可能性があることに注意すること。
- ・ 腫れ、しびれ、不快感、痛み、変色、または外観に異常が見られた場合は使用を中止すること。

より詳細な安全情報と使用手順については、製品ラベルと使用説明書を参照してください。

・ 事前に必ず使用説明書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。  
・ 製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売業者

**株式会社メディコン**

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎0120-036-541

**crbard.jp**



BD, the BD Logo and Spirit are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.  
© 2020 BD. All rights reserved.

2020.5.3.000. UCC\_C5009