

## 使用目的

本品は、導尿、採尿又は尿量測定のために、尿道から膀胱に挿入するカテーテルです。

## 禁止事項

- 一度使用した本品を再度使用しないでください。

## 使用上の注意


本品使用時に以下のトラブルが起こることがあります。異常を感じられた場合は、かかりつけ医療機関にご相談ください。

- (1) 不具合
- 本品の破損
  - カテーテルのつまり
- (2) 有害事象
- 感染
  - 尿道出血
  - 尿道炎症
  - 膀胱、尿道損傷
  - 破損片の体内遺残

## 保管方法及び有効期間等

- 高温多湿及び直射日光を避け、乾燥した涼しい場所で保管してください。
- 包装又は外箱に記載された使用期限までに使用してください。

天然ゴムラテックス、DEHP不使用

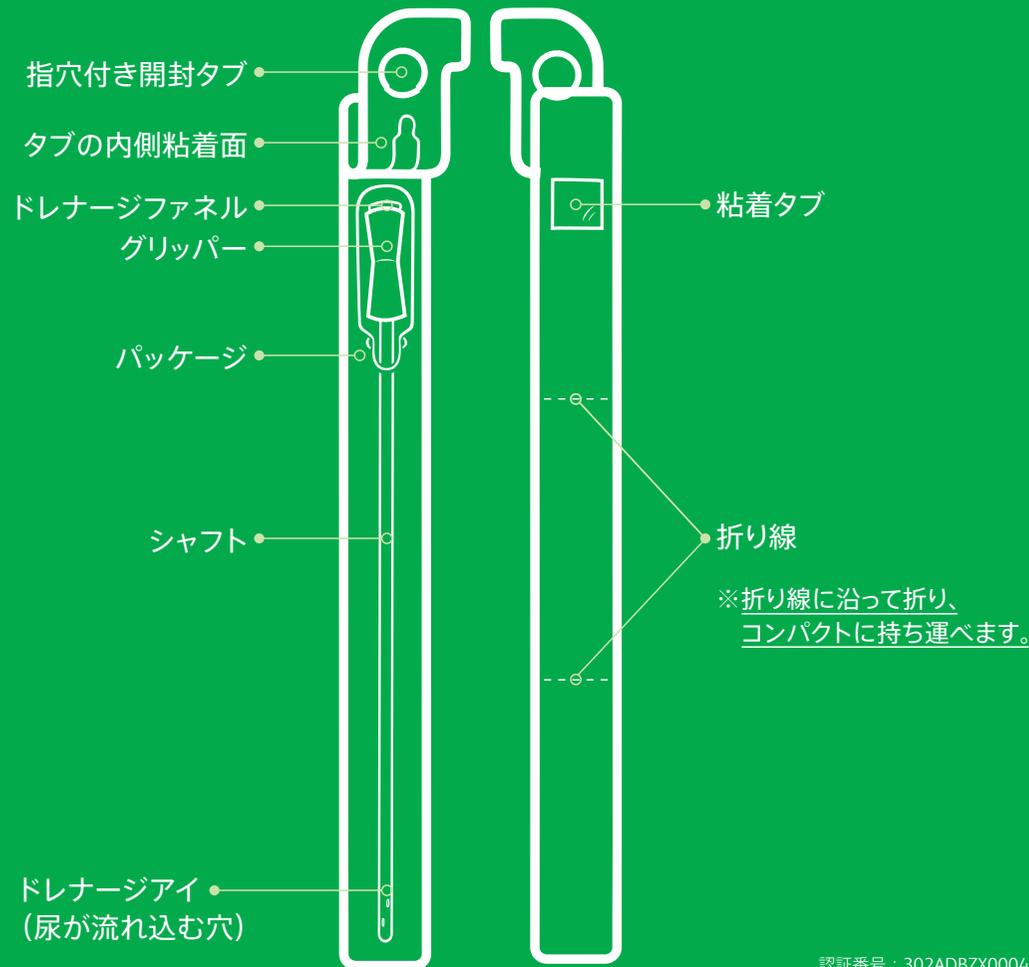

# Magic<sup>3</sup> Go<sup>®</sup>

HYDROPHILIC INTERMITTENT CATHETER  
with CleanGlide™ Technology

## MAGIC 3 GO 間欠導尿カテーテル 男性用 小児用 使用説明書

本品の使用方法及び使用上の注意について医療従事者から指導を受けて使用してください。  
本書はいつでも見返すことができるように保管しておいてください。

・事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。  
・本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。  
・製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

製造販売業者  
**株式会社メディコン**  
本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎0120-036-541  
[crbard.jp](http://crbard.jp)



BD, the BD Logo, CleanGlide, Magic<sup>3</sup>, Magic<sup>3</sup> Go and SureGrip are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.  
© 2020 BD. All rights reserved.

2020.7.5.000 UCC\_BD-18744

# MAGIC 3 GO 間欠導尿カテーテル 男性用 小児用 使用手順

